


Utilizzo dell'occlusore Occluform - Occluform-3

Occluform-3 è un occlusore integrabile con gli apparecchi di termoformatura Erkodent per la **registrazione dell'arcata antagonista** (brev. 19915567)

- Occluform-3 può essere montato solo su apparecchi Erkoform serie 3.
- Consente di registrare l'arcata antagonista direttamente con Erkoform serie 3 durante il processo di termoformatura!
- I modelli si fissano senza gesso.
- La costruzione monocolonna assicura la massima accessibilità al modello.
- L'articolazione dei modelli è garantita da un sistema idraulico bloccabile in ogni posizione.
- Occluform-3 è progettato sulla base di un triangolo di Bonwill con una lunghezza dei lati di 1,5 cm ed un angolo di Balkwill di 20°. Consente un rialzo del morso a valore medio.

Gli apparecchi Erkoform serie 3 sono predisposti per l'installazione semplice di Occluform-3. L'occlusore viene fissato all'apparecchio di termoformatura con un'unica vite di serraggio.

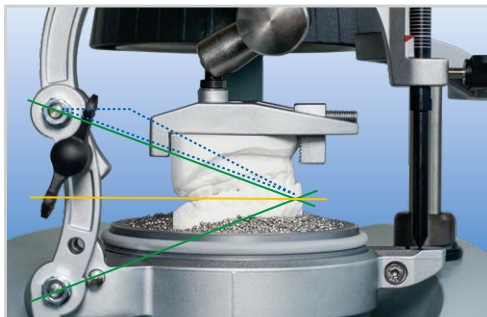

Suggerimenti - **Nota bene:** per termoformare su un'arcata superiore lo snodo superiore dell'articolatore deve essere bloccato dalla apposita vite a galletto mentre quando si termoforma su un'arcata inferiore è necessario bloccare lo snodo inferiore sempre con la medesima vite. (vedi anche le istruzioni Occluform-3).

- Squadrare i modelli fino ad ottenere una misura idonea per essere bloccata dalle ganasce di fissaggio (rettificare entrambi i modelli in articolazione).
- In caso di modelli molto piccoli ruotare la ganascia di fissaggio rivolta verso la marcatura sul bordo del contenitore portamodelli, in modo che il punto incisale non migri troppo all'indietro.

Accessori:

Occ3-PMF: Dispositivo per modelli stampati 3d, da utilizzare con Occluform-3 e Erkoform-3. Occ3-PMF set 188 575, Inserto per contenitore portamodelli con disco portamodelli, supporto per antagonista e chiave di fissaggio per il dispositivo di serraggio.



Occ3-aM: Dispositivo per l'allineamento del piano occlusale e punto incisale al valore medio utilizzando il portalavoro di Occluform-3. Il posizionamento e l'articolazione corrisponderanno quindi a quelli di un occlusore a valore medio.



Occ3-aM 188 589, 1 pezzo con supporto recipiente portamodelli

Lavorare con Occluform-3

Con Occluform è possibile registrare l'arcata antagonista su tutti i materiali di termoformatura. Tuttavia dischi sottili si raffreddano rapidamente e quindi sono meno adatti. Quanto maggiore è lo spessore del materiale di termoformatura usato, tanto più tempo è disponibile per la registrazione.

1. Con **Occ3-aM** posizionare e fissare il modello dell'arcata inferiore o superiore. l'area da termoformare deve sporgere dal bordo del contenitore. (**Occ3-aM 1.-4.**)



1. Senza Occ3-aM, fissare il modello dell'arcata inferiore o superiore (sbloccare lo snodo dell'Occluform, vedi istruzioni Occluform) nel contenitore portamodelli, l'area da termoformare deve sporgere dal bordo del contenitore.



3. Posizionare il perno sulla linea 0 (freccia), aprire lo snodo e mettere in articolazione i modelli.



Il morso può essere sollevato a valore medio.

5. Tenere in posizione la piastra portamodelli superiore e serrare lo snodo di arresto. Aprire Occluform.

Versare il granulato nel contenitore in modo che restino visibili l'area da termoformare più 3 mm ...



2. Fissare l'arcata antagonista sulla piastra portamodelli superiore. Con lo snodo di arresto prefissare il modello in posizione quanto più alta possibile. Chiudere Occluform. **Occ3-PMF (188 575) per il fissaggio dei modelli stampati 3d!**

4. Se è disponibile una mascherina di registrazione, mettere in articolazione i modelli allo stesso modo (vedi punto 3.).

La registrazione corrisponde esattamente alla mascherina.

6. Prestare attenzione a riempire col granulato anche le cavità sotto il modello. Isolare l'arcata antagonista (isolante alginico).

Procedere alla termoformatura.