

exMod-pro

INFO
IT

Dispositivo per rimuovere facilmente allineatori e
contenzioni termoformati dai modelli stampati 3d



exMod-pro
N°cod. 173 200



Erkodent Erich Kopp GmbH

Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Germania

info@erkodent.com • www.erkodent.com



exMod-pro
con modello
di stampa
montato
e foglio
termoformato,
pronto per la
rimozione.

Adatto per
tutti i fogli per
allineatori.



Modello stampato con
sedi per il fissaggio



Dima di serraggio per fogli di
spessore $\leq 0,6$ mm e per fogli
particolarmente morbidi.


exMod-pro-info-IT-08-04-26



Agganciare il foglio
termoformato e il modello
con le tasche di
aggancio sui perni e
premere delicatamente.



Premere l'interruttore blu
illuminato per avviare il
processo di separazione
che avverrà automatica-
mente.

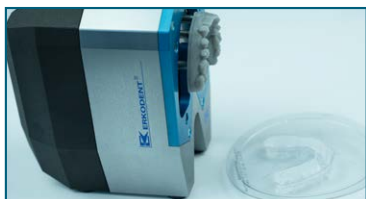

La lamina viene separata
dal modello e il modello
può essere rimosso.