

Helm-Strap für American Football



PLAY SAFE®

+ **PLAY SAFE® triple**

Anleitung:

► **1.** Helm-Strap-Ende und Befestigungsbereich am Mundschutz entfetten (Entfetter Best.-Nr. 613 050).

2. Mit dem Heißluftbrenner (Best.-Nr. 177 540) kurz den Befestigungsbereich am Mundschutz erwärmen.


3. Helm-Strap-Ende mit dem Brenner erhitzen und ...

4. ... sofort an den Befestigungsbereich am Mundschutz andrücken, entstehende Wülste mit einem glatten abgerundeten Instrument flachdrücken.

Achtung:

Diese Arbeiten müssen immer auf dem Modell durchgeführt werden, sonst besteht die Gefahr der Verformung des Mundschutzes.

584 025 tiefschwarz, 10 Stück

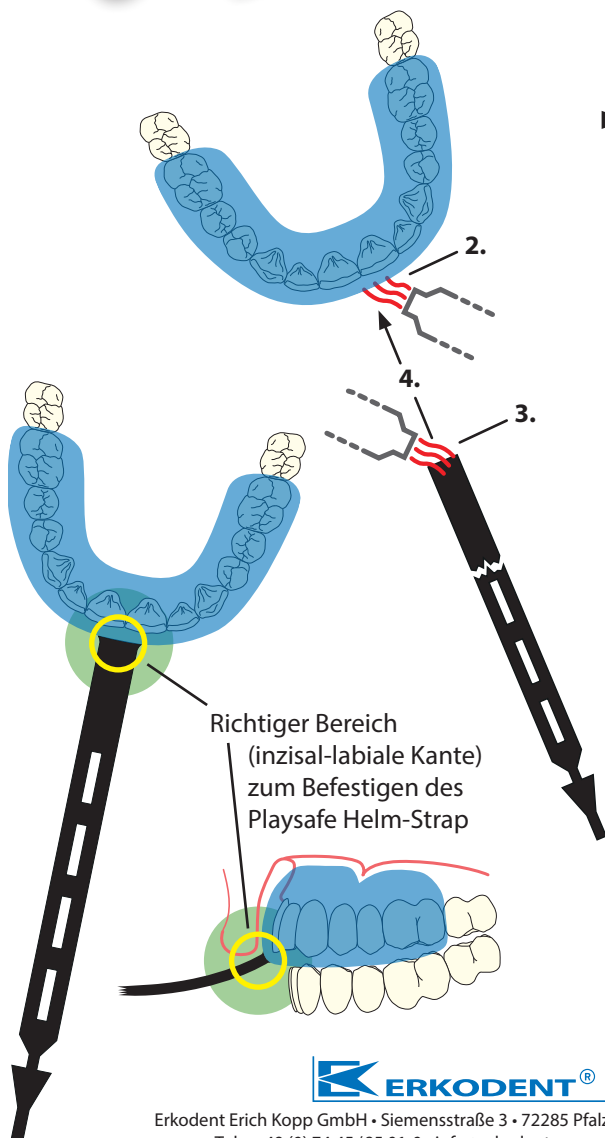

ERKODENT®

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Deutschland
Tel.: + 49 (0) 74 45 / 85 01-0 • info@erkodent.com • www.erkodent.com